

■ご使用の前に■

- このたびは、腰サポートインナー「カレナ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
- 本製品をお使いいただく際には、この取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。
- お読みいただいた後は、紛失しないように保管し、使用方法が分からない場合には再度お読みください。

■本製品の用途と特徴■

- 本製品は、中腰姿勢時の腰の負担を軽減するインナーウェアです。
- 本製品は、上下を連結した状態で腰を曲げることで、肩から腰にかけて配置された弾性生地が伸び、サポート力を発揮します。
- 必ず上下を合わせてご使用ください。
- 体感できるサポート力には個人差があります。

■安全上の注意(必ずお読みください)■

 警告 (その危険を回避できなかった場合に、使用者や第三者者が死亡又は重傷を負う可能性のあるもの)

- 本製品は、腰痛そのほかの疾患を治癒するものではありません。治療目的でのご使用はお止めください。
- 本製品は、自身が持っている以上の力を発揮できるものではありません。本製品の着用中に、過度に重たいものを持つことや、必要以上に腰に負担のかかる姿勢を取ることを避けてください。
- 用途以外でのご使用はお止めください。ケガや本製品の破損の原因となります。
- 本製品の改造・加工はおこなわないでください。使用中に本製品が破損するなどし、ケガをすることがあります。
- 以下に該当する方はご使用をおやめください。症状の悪化や異常の発生を招くことがあります。
 - ◆肩、胸、腰等の装着部位に、ケガや血行不良その他の疾患がある方
 - ◆妊娠中または妊娠している可能性がある方
 - ◆低体力の方
- 以下の場合は、すぐにご使用を中止し、専門医にご相談ください。
 - ◆痛み、しびれなどの異常を感じた場合
 - ◆かゆみ、かぶれ、湿疹などの異常を感じた場合
- 以下のことを必ず守ってご使用ください。正しくご使用されない場合、充分なサポートが得られないだけでなく、身体が過度に圧迫され、ケガや本製品の破損の原因となります。
 - ◆サイズ表を参考に、ご自身に適したサイズの製品をご使用ください。
 - ◆本取扱説明書裏面に記載の「着用方法」に従って装着・調節してください。
 - ◆直立時に張力を感じる場合は、再度「着用方法」の3,4に従って、装着・調節し直してください。
 - ◆前屈時に張力が感じられない場合は、再度「着用方法」の3,4に従って、装着・調節し直してください。
 - ◆就寝時のご使用はお止めください。
- 本製品に破れ、亀裂、破損などが見られる場合はご使用をお止めください。
- 弾性生地に伸縮性が無くなった場合は、ご使用をお止めください。

■保管方法■

- 直接日光が当たらない湿気の少ない風通しの良い場所に保管してください。

■廃棄方法■

- 地域のルールに従って廃棄してください。
(詳しくは自治体にお問い合わせください。)

■お洗濯の注意■

- 塩素系漂白剤は、商品の機能を損なう恐れがありますので使用しないでください。
- 濃色物と白物との同時洗濯は、色移り、ケバ付着の原因となりますので、お避けください。
- 白物と色物とのつけおきは避け、洗濯後は速やかに形を整えて干してください。
- 衣類乾燥機の使用はお避けください。
- 着用や、洗濯の繰り返しの摩擦により、毛玉が発生することがあります。

<タンクトップについて>

- この製品は、生地端裁ち切りで無縫製しています。この無縫製の生地端は特殊加工ではつれにくいためになっていますが、強く引っ張ったりしますと部分的にほつれた状態になることがあります。着脱の際には生地端に強い力がかかるないようにご注意ください。
- 商品のお洗濯は、手洗いをお勧めします。



<ショートレギンスについて>

- 洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットを使用してください。



■素材表示■

<タンクトップ>

身生地	ポリエチル 40% レーヨン 30% 綿 20% ポリウレタン 10%
前身脇ヨーク・ベルト上辺部	ポリエチル 100%
ベルト下辺部	ナイロン 75% ポリウレタン 25%
テープ部	ナイロン 95% ポリウレタン 5%
吊り紐部	ポリエチル 100%

<ショートレギンス>

身生地	ナイロン 55% 綿 25% ポリウレタン 20%
吊り紐部	ポリエチル 100%

■参考サイズ表■

タンクトップ

呼び方	M	L	LL
バスト	79-87	86-94	93-101

ショートレギンス

呼び方	M	L	LL
ウエスト	64-70	69-77	77-85
ヒップ	87-95	92-100	97-105

販売元

株式会社モリタホールディングス

〒105-0003 東京都港区西新橋3丁目25-31


製造元

グンゼ株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目10-4

■着用方法 ■

1 着用の前に、各部の呼称をご確認ください。

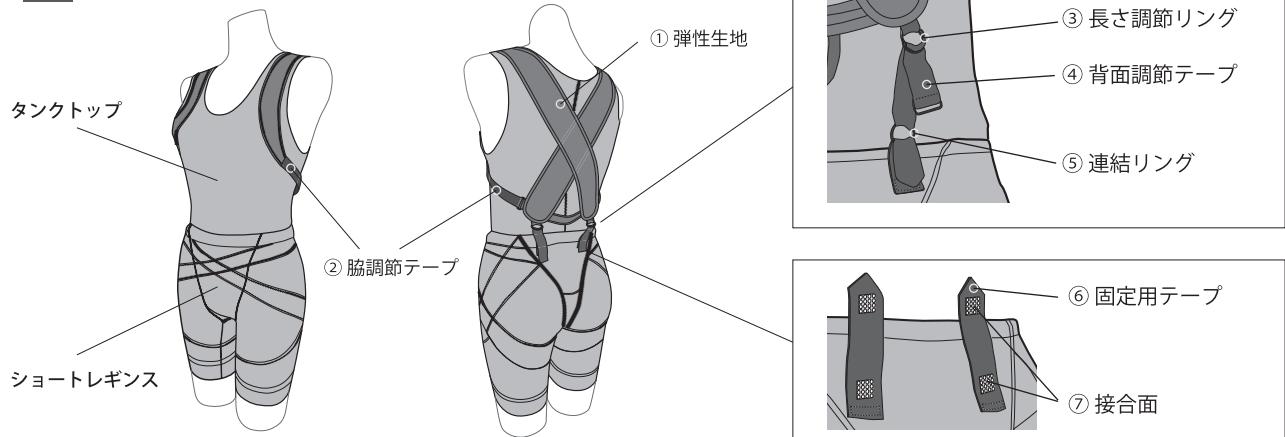


2 タンクトップ、ショートレギンスをそれぞれご着用ください。


3 左右の⑤連結リングに⑥固定用テープを通し、タンクトップとショートレギンスを連結してください。



4 下図を参考に、タンクトップの②脇調節テープ長さを体にフィットするように調節してください。

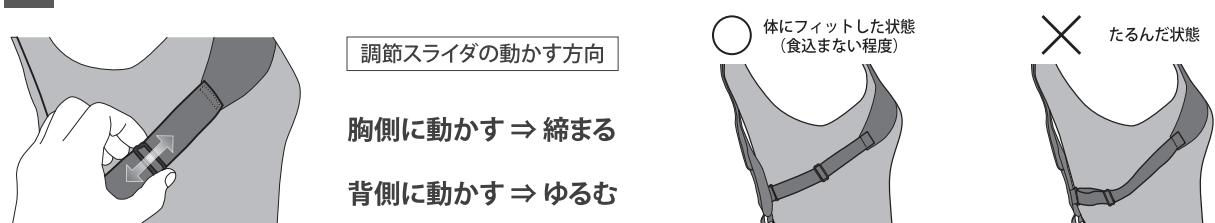

5 下図を目安に、④背面調節テープを引っ張り、サポート力を調節してください。

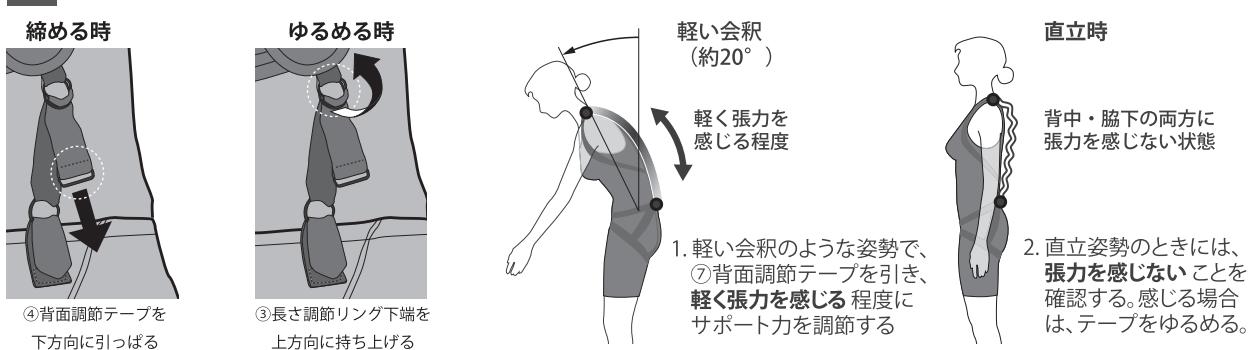

6 着用完了です。裾部など全体を整え、締め付けやズレがないか、ご確認ください。

・前屈時にサポートを感じない場合や、強い締め付けやズレが生じる場合は、3および4をご確認ください。

特に、②脇調節テープがたるんだ状態では、サポート力が発揮されない場合があります。

・①弹性生地やテープなどがからんだ場合は、無理に着用せず、机の上などの平らな面に広げ、形を整えてから、着用してください。肩部から①弹性生地のからみを解くことで、形を整えやすくなります。

・脱ぐ際には、⑥固定用テープの⑦接合面を外してください。